

Notice simplifiée FRED PA-1



Utilisation sur patient



- 1 Appelez les secours
- 15** SAMU ou **18** Pompiers ou **112** Urgences



- 2 Soulevez le capot, l'appareil démarre immédiatement.



- 3 Ouvrez le sachet d'électrodes situé dans le capot



- 4 Collez les électrodes sur le patient. Si ça n'est pas le cas, connectez les à l'appareil.



- 5 L'analyse démarre automatiquement. **NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT**



- 6 Si l'appareil le demande, appuyez sur le bouton choc orange
NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT



- 7 Quand l'appareil vous le demande, pratiquez du massage cardiaque pendant 2 minutes en suivant le rythme du signal sonore

Suivez les instructions de l'appareil jusqu'à l'arrivée des secours

Contrôle visuel de l'appareil



Appareil prêt à l'emploi

Maintenance requise



Remplacez les électrodes

Remplacez la pile

